

FisioEnema

Enema de limpieza. Vía rectal.

250 ml de suero fisiológico

Fórmula

Solución de suero fisiológico al 0,9%.

Frasco de plástico flexible, herméticamente cerrado, con válvula antirretorno, cánula rectal prelubrificada libre de látex, y listo para su uso.

Indicaciones

En aquellos casos en que sea necesaria una limpieza intestinal, como en impactación fecal, antes de exámenes radiológicos, endoscópicos u operaciones quirúrgicas, exploraciones intestinales y ginecológicas, y partos.

Posología

En general, se recomienda 1 o 2 enemas por día, dependiendo del cuadro clínico. El efecto deseado de FisioEnema tiene lugar generalmente alrededor de los 5 minutos desde su aplicación.

Instrucciones de uso

Quitar la funda naranja protectora de la cánula prelubrificada. Introducir la cánula en el recto de forma cuidadosa para evitar lesiones en la pared del mismo y oprímase el envase de manera suave y continuada hasta que penetre la cantidad de líquido requerida.

No es necesario vaciar completamente la botella, ya que la cantidad de líquido existente es superior al necesario para lograr el efecto deseado. FisioEnema debe administrarse por vía rectal.

Para la autoaplicación de FisioEnema se recomienda que el paciente esté reclinado sobre el lado izquierdo y con ambas piernas dobladas sobre el pecho (Figura 1) o reclinado con la pierna izquierda extendida y la derecha doblada sobre el pecho (Figura 2).

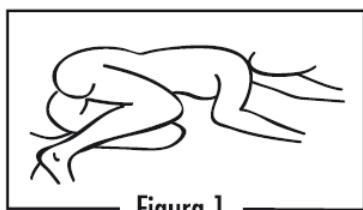


Figura 1

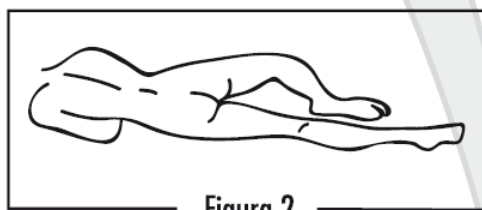


Figura 2

Si FisioEnema va a ser administrado por otra persona, las posiciones recomendadas pueden ser o bien las descritas en la autoaplicación o la que aparece en la figura 3.

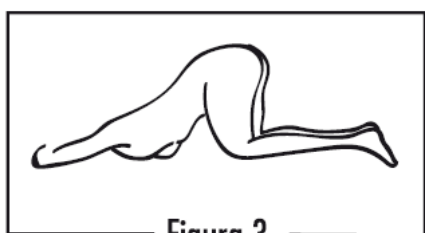


Figura 3

Mantener las posiciones indicadas hasta que se sientan fuertes deseos de evacuar (alrededor de 5 minutos). Si no se produjera evacuación, consultar al médico o farmacéutico.

Efectos adversos

No se conocen a las dosis recomendadas. No obstante, si se observara alguna reacción consulte a su médico o farmacéutico.

Información adicional

C.N. 202574.5

Laboratorios Casen-Fleet
Utebo (Zaragoza)