

FisioEnema

Enema de limpieza. Vía rectal.

66 ml de suero fisiológico

Fórmula

Solución de suero fisiológico al 0,9%.

Frasco de plástico flexible, con válvula antirretorno, cánula rectal prelubrificada libre de látex, y listo para su uso.

Indicaciones

En aquellos casos en que sea necesaria una limpieza intestinal: antes de exámenes radiológicos, endoscópicos u operaciones quirúrgicas y exploraciones intestinales.

Posología

Dependiendo del cuadro clínico, en general se recomienda 1 o 2 enemas por día.

Niños menores de dos años: 1 enema de 66 ml por día (ver precauciones).

Niños de dos a quince años: 1 o 2 enemas de 66 ml por día.

El efecto deseado de FisioEnema tiene lugar generalmente alrededor de los 5 minutos desde su aplicación.

Precauciones

Niños menores de 2 años: usar con precaución. Consulte a su médico o farmacéutico para que le explique la técnica correcta de aplicación.

Instrucciones de uso

Quitar la funda naranja protectora de la cánula prelubrificada. Introducir la cánula en el recto de forma cuidadosa para evitar lesiones en la pared del mismo y oprímase el envase de manera suave y continuada hasta que penetre la cantidad de líquido requerida.

No es necesario vaciar completamente la botella, ya que la cantidad de líquido existente es superior al necesario para lograr el efecto deseado. FisioEnema debe administrarse por vía rectal.

Para la autoaplicación de FisioEnema se recomienda que el paciente esté reclinado sobre el lado izquierdo y con ambas piernas dobladas sobre el pecho (Figura 1) o reclinado con la pierna izquierda extendida y la derecha doblada sobre el pecho (Figura 2).

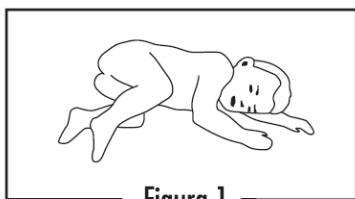


Figura 1

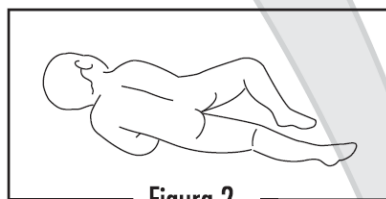


Figura 2

Si FisioEnema va a ser administrado por otra persona, las posiciones recomendadas pueden ser o bien las descritas en la autoaplicación o la que aparece en la figura 3.

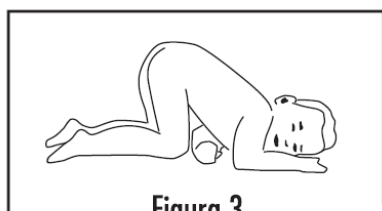


Figura 3

Mantener las posiciones indicadas hasta que se sientan fuertes deseos de evacuar (alrededor de 5 minutos). Si no se produjera evacuación, consultar al médico o farmacéutico.

Efectos adversos

No se conocen a las dosis recomendadas. No obstante, si se observara alguna reacción consulte a su médico o farmacéutico.

Información adicional

Este producto sanitario no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

C.N. 240303.1



Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza)