

FisioEnema

Solución de suero fisiológico al 0,9%.

Enema de limpieza. Vía rectal.

66 ml de suero fisiológico

¿Qué es FisioEnema y para qué sirve?

Es un enema de limpieza a base de suero fisiológico de administración rectal. FisioEnema está indicado para niños menores de 2 años en aquellos casos en los que sea necesaria una limpieza intestinal: impactación fecal, antes de exámenes radiológicos, endoscópicos u operaciones quirúrgicas y exploraciones intestinales.

Composición

Ingredientes: cloruro sódico, cloruro de benzalconio, edetato disódico y agua purificada.

Ingredientes activos: cloruro sódico 0,9%.

Posología

Dependiendo del cuadro clínico, en general se recomienda 1 o 2 enemas por día (ver advertencias).

El efecto deseado de FisioEnema tiene lugar generalmente alrededor de los 5 minutos desde su aplicación.

Instrucciones de uso

Quitar la funda naranja protectora de la cánula prelubrificada. Introducir la cánula en el recto de forma cuidadosa para evitar lesiones en la pared del mismo y oprímase el envase de manera suave y continuada hasta que penetre la cantidad de líquido requerida.

No es necesario vaciar completamente la botella, ya que la cantidad de líquido existente es superior al necesario para lograr el efecto deseado. FisioEnema debe administrarse por vía rectal.

Para la autoaplicación de FisioEnema se recomienda que el paciente esté reclinado sobre el lado izquierdo y con ambas piernas dobladas sobre el pecho (Figura 1) o reclinado con la pierna izquierda extendida y la derecha doblada sobre el pecho (Figura 2).

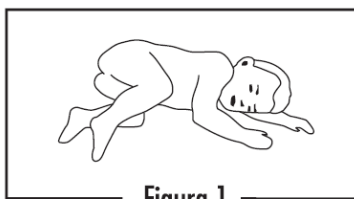


Figura 1

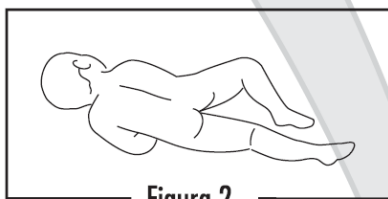


Figura 2

Si FisioEnema va a ser administrado por otra persona, las posiciones recomendadas pueden ser o bien las descritas en la autoaplicación o la que aparece en la figura 3.

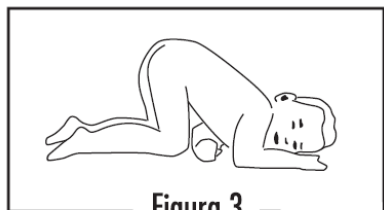


Figura 3

Mantener las posiciones indicadas hasta que se sientan fuertes deseos de evacuar (alrededor de 5 minutos). Si no se produjera evacuación, consultar al médico o farmacéutico.

Advertencias

Niños menores de 2 años: usar con precaución. Consulte a su médico o farmacéutico para que le explique la técnica correcta de aplicación.

Si en el momento de la aplicación nota resistencia debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina. En esta situación, consulte con su médico.

Este producto sanitario contiene cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio puede provocar irritación local.

Producto de un solo uso. El enema contiene una dosis única de producto y debe desecharse el mismo tras su uso para evitar posibles infecciones.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de los ingredientes del producto.

Posibles efectos adversos

No se conocen efectos adversos a las dosis recomendadas. No obstante, si se observara alguna reacción adversa consulte a su médico o farmacéutico o contacte directamente con Casen Recordati en la siguiente dirección de correo electrónico: pharmacovigilance@casenrecordati.com.

Caducidad y conservación

No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
Este producto sanitario no requiere condiciones especiales de conservación.
Se debe conservar fuera de la vista y del alcance de los niños.

Contenido del envase

Producto sanitario que se presenta en un envase de 66 ml de plástico flexible, herméticamente cerrado, con válvula antirretorno, cánula rectal prelubrificada libre de látex, y listo para su uso.

Fecha de revisión del texto: febrero 2019.

Pueden solicitar más información respecto a este producto sanitario dirigiéndose al titular de comercialización, contactando con la siguiente dirección de correo electrónico: info@casenrecordati.com

C.N. 240303.1



LOT



CE 0051



Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km. 13,300
50180 Utebo (Zaragoza) - España