



## Muvagyn® Probiótico Tampón con aplicador

### Muvagyn® probiótico tampón - Para la salud vaginal

Muvagyn® Probiótico Tampón con aplicador es un producto vaginal para la prevención del desequilibrio de la microflora de la vagina. Muvagyn® Probiótico Tampón contiene bacterias productoras de ácido láctico, favorece la salud vaginal y proporciona una protección higiénica fiable y cómoda.

### Flora vaginal saludable

En la microflora vaginal de las mujeres sanas predominan las bacterias productoras de ácido láctico del género *Lactobacillus*. Estas bacterias beneficiosas producen de manera natural ácido láctico y equilibran el pH de la vagina. En una vagina sana, el pH es tan bajo (pH de 3,8 a 4,2) que la mayoría de los demás microorganismos no prosperan. Además de regular los niveles de pH, los

## Muvagyn®

lactobacilos protegen el medio vaginal de varios modos diferentes, haciendo que la flora vaginal saludable sea la primera línea de defensa del organismo frente a infecciones genitourinarias.

### Desequilibrios de la flora vaginal

Cuando se perturba el equilibrio natural de la microflora vaginal aumenta el riesgo de desarrollar infecciones genitourinarias. Las causas conocidas de desequilibrio de la flora vaginal incluyen sexo sin protección, uso exagerado de productos higiénicos, estrés, prendas de ropa sintéticas ceñidas y el uso de antibióticos. Las infecciones vaginales más comunes son la vaginitis bacteriana y la vaginitis por *Candida* (infección por levaduras). Estos estados provocan una variedad de síntomas vaginales tales como picor, irritación, olor desagradable y aumento del flujo vaginal.

## Probiótico Tampón con aplicador

Si no se han diagnosticado sus síntomas, es importante que consulte a su médico. El médico puede prescribirle antibióticos o antifúngicos para tratar la infección vaginal.

### Muvagyn® probiótico tampón - un producto sanitario de doble acción

Muvagyn® probiótico tampón le ayuda a restaurar y mantener una flora vaginal saludable y también le ofrece una perfecta protección higiénica durante su menstruación. Muvagyn® probiótico tampón está certificado y cumple todos los requisitos esenciales para la seguridad establecidas en la Directiva sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE. Se logra la gestión de riesgos basándose en la norma ISO14 971.

## Muvagyn®

**¿Para quién está indicado?**  
Muvagyn® probiótico tampón es adecuado para mujeres que presentan un desequilibrio microbiológico vaginal y para mujeres que quieren prevenirlo. Para mantener una flora bacteriana saludable, puede utilizar Muvagyn® probiótico tampón como complemento del tratamiento farmacológico de las infecciones vaginales.

**Nota:** Muvagyn® probiótico tampón no debe utilizarse en casos de enfermedad sistémica grave o de inmunodeficiencia.

### Muvagyn® probiótico tampón - el resultado de años de investigación

Muvagyn® probiótico tampón es el resultado de muchos años de investigación sueca en los campos de la ginecología, la microbiología y la bioquímica. Muvagyn® se

## Probiótico Tampón con aplicador

produce con una nueva tecnología sobre la que se han concedido patentes a nivel mundial.

### Muvagyn® probiótico tampón - clínicamente probado

Estudios clínicos han demostrado que Muvagyn® probiótico tampón reduce la incomodidad vaginal como picor e irritación y es seguro de usar. Muvagyn® también refuerza su flora vaginal natural, lo que protege su vagina del desequilibrio bacteriano.

### Cómo funciona

Varios estudios científicos han demostrado que las bacterias vaginales que producen ácido láctico desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la salud vaginal.

Muvagyn® probiótico tampón contiene Lacto Naturel® (LN®), una mezcla de

## Muvagyn®

cepas de bacterias probióticas que producen ácido láctico que son una parte natural de una flora vaginal saludable, producen de manera natural ácido láctico y, por tanto, equilibran los niveles de pH en la vagina. Las bacterias probióticas LN actúan juntas para respaldar la microflora vaginal y promueven la salud vaginal.

Cuando el tampón alcanza la temperatura corporal, las bacterias probióticas empiezan a difundirse desde el interior hacia la superficie del tampón y hacia la cavidad vaginal.

A veces se ven en el tampón pequeños puntos marrones. Son manchas de lactobacilos, que tienen color beige o marrón y han llegado a la superficie del tampón en lugar de permanecer en su parte interior; el tampón es perfectamente adecuado para el uso.

## Probiótico Tampón con aplicador

### Usar Muvagyn® probiótico tampón de manera regular

Muvagyn® probiótico tampón puede tener efectos positivos sobre la flora vaginal incluso desde el primer periodo menstrual. Algunas mujeres no experimentan los efectos probióticos positivos hasta después de tres o cuatro periodos menstruales consecutivos.

La salud vaginal mejora más si usa Muvagyn® probiótico tampón de manera regular durante sus periodos menstruales.

### Se recomienda utilizar como mínimo tres tampones durante tres días y durante tres periodos menstruales consecutivos.

Puede utilizar Muvagyn® probiótico tampón solo o combinarlo con su protección menstrual habitual.

## Muvagyn®

### Muvagyn® probiótico tampón - para sus necesidades individuales

La intensidad del sangrado menstrual difiere de una mujer a otra y varía en días diferentes de un único periodo. El sangrado es perceptiblemente más intenso al comienzo del periodo, cuando se eliminan aproximadamente 2/3 de la sangre menstrual. El sangrado disminuye hacia el final del periodo, hasta que finalmente se detiene totalmente.

Muvagyn® probiótico tampón está disponible en tres tamaños: Muvagyn® Mini, Muvagyn® Regular y Muvagyn® Super. Los diferentes tamaños del tampón tienen capacidades de absorción variables para adaptarse a la variación en el flujo menstrual. Elija el aplicador que mejor se ajuste a sus necesidades. Todos los tampones Muvagyn® contienen la misma cantidad de probiótico.

## Probiótico Tampón con aplicador

### Para días leves y quienes lo usan por primera vez:

- Muvagyn® probiótico tampón Mini, absorbe < 6,0 g,

### Para días leves a intermedios:

- Muvagyn® probiótico tampón Regular, absorbe 6-9 g,

### Para días intermedios a intensos:

- Muvagyn® probiótico tampón Super, absorbe 9-12 g,

*Las gotas en el envase ilustran las cantidades de fluido menstrual según los criterios de EDANA.*

Muvagyn® probiótico tampón ofrece una protección higiénica, segura, discreta y cómoda. Los tampones están compuestos de fibras absorbentes naturales. Diseñados con ocho ranuras, se expanden de forma

## Muvagyn®

uniforme y proporcionan mejor absorción y una protección segura. Los tampones Muvagyn® con aplicador están provistos de un aplicador de plástico que facilita la inserción cómoda del tampón.

### Muvagyn® probiótico tampón para quienes usan tampones por primera vez

Puede usar Muvagyn® probiótico tampón desde su primer periodo. El himen tiene una abertura, y habitualmente es lo suficientemente flexible para permitir la inserción de Muvagyn® probiótico tampón usando los tamaños mini y regular sin ningún problema, y sin dañar el himen.

Tómese su tiempo durante la primera inserción, y con calma familiarícese primero con su cuerpo. Cuanto más relajada esté, más fácil resulta insertar el tampón. Los músculos del suelo pélvico pueden estrecharse en la región frontal de la

## Probiótico Tampón con aplicador

vagina, creando así la impresión de que la vagina es demasiado estrecha. Sólo respire de manera regular y se relajarán los músculos, entonces puede insertarse el tampón de manera fácil y segura. El tampón está colocado de forma óptima cuando se encuentra en el centro de la vagina y no puede sentirse. Encontrará que la inserción de los tampones se vuelve fácil y sin problemas con un poco de práctica.

### Inserción de Muvagyn® probiótico tampón

**Recuerde:**  
Lávese las manos escrupulosamente antes de insertar el tampón.

Relájese y colóquese en una posición cómoda; por ejemplo, puede sentarse en el wc con las rodillas separadas. También puede probar de pie con una pierna apoyada en el wc o en cuclillas, con las rodillas ligeramente separadas.



# Muvagyn® Probiótico Tampón CON APLICADOR



0073A