

Muvagyn®

centella asiática

Gel vaginal para el tratamiento regenerador de la mucosa vulvovaginal



Muvagyn® centella asiática es un producto sanitario para el tratamiento regenerador de la mucosa vulvovaginal. Antes de empezar a utilizar este producto, lea las instrucciones de uso detenidamente y consérvelas ya que puede tener que volver a leerlas.

¿QUÉ ES MUVAGYN® CENTELLA ASIÁTICA?

Muvagyn® centella asiática es un gel no hormonal a base de hialuronato sódico y lisado celular de *Centella asiática*, con una relación óptima de madecacósidos y asiaticósidos, especialmente desarrollado para favorecer la regeneración, flexibilidad y elasticidad de la mucosa vaginal.

Muvagyn® centella asiática mejora significativamente la regeneración de la mucosa vaginal gracias a su contenido en ácido hialurónico y al lisado celular de *Centella asiática*. El lisado celular de *Centella asiática* refuerza la acción del ácido hialurónico estabilizando y protegiendo la mucosa vaginal, otorgando a **Muvagyn® centella asiática** actividades tanto de hidratación como de regeneración tisular.

Muvagyn® centella asiática también se puede aplicar en la zona externa para el tratamiento de la sequedad vulvar.

Muvagyn® centella asiática no es graso y no mancha.

¿CUÁNDO UTILIZAR MUVAGYN® CENTELLA ASIÁTICA?

Muvagyn® centella asiática está destinado para situaciones que cursan con alteración de la mucosa vulvovaginal, especialmente aquellas producidas por la reducción de los niveles de estrógenos que provoca sequedad vaginal.

Además, puede producirse pérdida de los pliegues rugosos vaginales y adelgazamiento de la mucosa, debido a la reducción del soporte de colágeno del epitelio vaginal. La sequedad vaginal se produce cuando disminuyen las secreciones de la vagina y esta pierde su lubricación natural. Algunos de los síntomas de sequedad vulvovaginal son dolor en las relaciones sexuales, sensación de quemazón, escozor o picor vaginal, o flujo vaginal anormal.

Las causas de la sequedad vaginal son muy diferentes, entre ellas se encuentran:

- Post-parto
- Último periodo del ciclo menstrual
- Menopausia
- Peri-menopausia
- Anticonceptivos orales
- Radioterapia

POSOLOGÍA:


Se recomienda una aplicación de **Muvagyn® centella asiática**, 2 veces por semana en días alternos. Como por ejemplo: Lunes/Miércoles o Martes/Jueves.

INSTRUCCIONES DE USO:

Uso vulvovaginal. Uso interno y externo.

Cada aplicador es de un solo uso. Una vez abierto no reutilizar.

- Retirar el tapón del aplicador monodosis
- Coloque la cánula en posición vertical con la punta hacia arriba y oprímalo ligeramente para que unas gotas del gel humedezcan el extremo de la cánula con objeto de facilitar su introducción en la vagina.
- Introducir la cánula en el interior de la vagina. Una vez bien colocado, presionar suavemente el aplicador hasta la total aplicación del contenido del gel.
- Retirar suavemente la cánula para no extraer parte del contenido del gel ya depositado en la vagina.

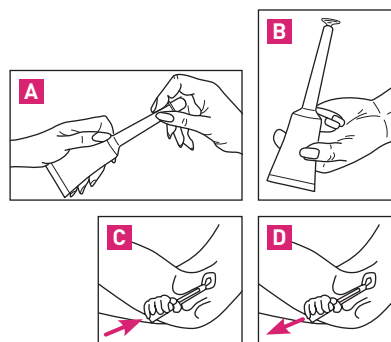

A fin de facilitar la aplicación, el aplicador está cargado con un exceso de producto que queda en él tras su uso, de forma que la cantidad de producto que se libera en la aplicación es la dosis completa. Cada aplicador contiene una dosis única de producto, debe desecharse el mismo tras su uso.

Si las molestias vaginales persisten por más de 30 días, consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES:

No debe utilizar **Muvagyn® centella asiática** si es alérgica a cualquiera de los componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No se recomienda la aplicación interna para mujeres adolescentes que no hayan tenido su primera menstruación.

En caso de ingesta accidental, consulte al médico.

Si durante el uso de **Muvagyn® centella asiática** empeoran las molestias vaginales o no mejoran consulte a su médico. Cada aplicador es de un solo uso. Una vez abierto no reutilizar. El aplicador contiene una sola dosis de producto y cualquier contenido residual debe desecharse. Si el producto se reutilizara no se podría garantizar la eficacia, ya que se administraría una cantidad menor de gel. Además, sería posible que el contenido restante se haya contaminado.

SOBREDOSIS

No se esperan problemas de sobredosis. Sin embargo, no existen estudios realizados en esta situación; por lo tanto, se recomienda consultar a un médico en caso de sobredosis.

INTERACCIONES:

No se esperan interacciones con otros dispositivos, medicamentos u otras sustancias. Sin embargo, no existen estudios realizados en esta situación; por lo tanto, se recomienda consultar a un médico en caso de usar otros dispositivos o tomar medicamentos.

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se esperan efectos negativos en embarazadas o en mujeres en periodo de lactancia. Sin embargo, no hay estudios realizados en estos periodos, por lo tanto, se recomienda consultar al médico antes de utilizar este producto sanitario.

USO DE MUVAGYN® CENTELLA ASIÁTICA CON OTROS PRODUCTOS:

Muvagyn® centella asiática es compatible con el uso de preservativos de látex.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

En muy raras ocasiones, el uso de **Muvagyn® centella asiática** puede producir prurito, picor, escozor o producir una reacción alérgica.

En caso de reacción alérgica, detenga inmediatamente el uso del producto e informe a su médico o farmacéutico.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en estas instrucciones de uso.

Comunicación de incidentes graves:

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante Casen Recordati en la siguiente dirección de correo electrónico: pharmacovigilance@casenrecordati.com y a la autoridad competente de España a través del sistema nacional de comunicación: <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

COMPOSICIÓN:

Ingredientes activos: Hialuronato de sodio: 0,1%; lisado celular de *Centella asiática*: 5%

Ingredientes: Agua, Propilenglicol, Lisado de células madre de *Centella asiática*, Extracto de *Chamomilla Recutita*, Extracto de *Malva Sylvestris*, Trietanolamina, Acrilatos/ C10-30 crosopolímero de Alquil acrilato, Metilparabeno, Imidazolidinil urea, Hialuronato de sodio, EDTA disódico, Propilparabeno y Ácido ascórbico.

Muvagyn® centella asiática es un gel translúcido de color amarillento y olor característico.

Cada caja de **Muvagyn® centella asiática** contiene 8 aplicadores monodosis de 5 ml.

CADUCIDAD Y CONSERVACIÓN:

Muvagyn® centella asiática debe conservarse fuera de la vista y del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Este producto sanitario se debe conservar a temperaturas inferiores de 25 °C.

No utilice **Muvagyn® centella asiática** después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Cada aplicador es de un solo uso. Una vez abierto no reutilizar.

No utilice **Muvagyn® centella asiática** si el envase ha resultado dañado o se ha abierto.

Los productos sanitarios no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los productos sanitarios que no necesita en los puntos de recogida autorizados. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y los productos sanitarios que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

Puede solicitar más información respecto a este producto sanitario dirigiéndose al fabricante a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@casenrecordati.com



Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño, km 13,300
50180 UTEBO (Zaragoza) – España
www.casenrecordati.com

Última revisión del texto:
Abril 2022

Explicación de símbolos									
Símbolo de reciclado	Código de lote	Fecha de caducidad	Marcado CE	Fabricante	No reutilizar - Para un solo uso	Consúltense las instrucciones de uso	Conservar a temperaturas inferiores de 25 °C	No utilizar si el envase está dañado y consúltense las instrucciones de uso	Producto sanitario Identificación única de producto